



Il prelievo viene eseguito con CYTOBRUSH per recuperare più materiale dal quale estrarre DNA per l'esecuzione dei test genetici.

La modalità di prelievo è la seguente:

- ✓ Aprire la custodia ed estrarre lo scovolino sterile.
- ✓ Passare lo scovolino all'interno delle guance destra e sinistra prolungando per circa 30 secondi per lato.
- ✓ Riporre lo scovolino nella stessa custodia e scrivere cognome e nome del paziente sul retro.
- ✓ Se possibile chiudere con nastro adesivo altrimenti è sufficiente ripiegare il lembo della custodia.
- ✓ Il prelievo si conserva a lungo a temperatura ambiente.
Non è quindi necessario mettere in atto alcun metodo particolare di conservazione anche nel caso in cui il prelievo venga inviato dopo diversi giorni.

Per qualunque dubbio e/o ulteriore chiarimento:

telefonare al numero 050 744580

(da Lunedì al Venerdì con orario 09.00-12.30/15.00-18.30)

Oppure:

inviare una e-mail al seguente indirizzo: genetica.allergoline@gmail.com.