



LA MODALITÀ DI PRELIEVO È LA SEGUENTE

- ✓ Aprire la custodia ed estrarre lo scovolino sterile (o il tampone a secco).
- ✓ Passare lo scovolino all'interno delle guance destra e sinistra del proprio animale prolungando per circa 30 secondi per lato.
- ✓ Riporre lo scovolino nella stessa custodia e scrivere nome dell'animale e cognome e nome del proprietario sul retro.
- ✓ Se possibile chiudere con nastro adesivo altrimenti è sufficiente ripiegare il lembo della custodia.
- ✓ Dopo il prelievo lo scovolino si conserva a temperatura ambiente anche per diversi giorni.
- ✓ Dopo il prelievo inserire nella busta gialla il tampone nella sua bustina ed il modulo richiesta test correttamente compilato in ogni sua parte e firmato. ***Scrivere in maniera chiara e leggibile.***

Per qualunque dubbio e/o ulteriore chiarimento:

telefonare al numero 050 744580

(da Lunedì al Venerdì con orario 09.00-12.30/15.00-18.30)

Oppure:

inviare una e-mail al seguente indirizzo: genetica.allergoline@gmail.com.