



## TEST DI FARMACOGENETICA

### ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO BUCCALE

Il prelievo viene eseguito con CYTOBRUSH per recuperare più materiale dal quale estrarre DNA per l'esecuzione dei test genetici.

#### **La modalità di prelievo è la seguente:**

- ✓ Aprire la custodia ed estrarre lo scovolino sterile.
- ✓ Passare lo scovolino all'interno delle guance destra e sinistra prolungando per circa 30 secondi per lato.
- ✓ Riporre lo scovolino nella stessa custodia e scrivere cognome e nome del paziente sul retro.
- ✓ Se possibile chiudere con nastro adesivo altrimenti è sufficiente ripiegare il lembo della custodia.
- ✓ Il prelievo si conserva a lungo a temperatura ambiente. Non è quindi necessario mettere in atto alcun metodo particolare di conservazione anche nel caso in cui il prelievo venga inviato dopo diversi giorni.

#### **Per qualunque dubbio e/o ulteriore chiarimento:**

telefonare al numero 050 744580

(da Lunedì al Venerdì con orario 09.00-12.30/15.00-18.30)

#### **Oppure:**

inviare una e-mail al seguente indirizzo: [genetica.allergoline@gmail.com](mailto:genetica.allergoline@gmail.com).